



Pat mobil de poziționare mecanică UNIZDRAV



Când primiți patul responsabilitatea pentru utilizarea sa corectă cu grijă adecvată trece la dumneavoastră. Prin urmare citiți cu atenție instrucțiunile anexate și familiarizați-vă cu echipamentele tehnice, manipularea și utilizarea tuturor funcțiilor.

Acest manual de utilizare vă va familiariza cu funcțiile patului de spital și în plus descrie:

- cum să configurați patul de spital,
- cum să controlați patul de spital,
- cum să îngrijiți și să efectuați întreținerea patului de spital.

Pat mecanic cu două funcții de poziționare

Paturile de spital descrise în acest manual sunt construite conform următoarelor standarde: ISO, CE.

Utilizarea prevăzută

Acest pat este conceput pentru poziționarea și transportul pacienților, ca ajutor în tratamentul și ameliorarea bolilor sau în caz de rănire sau handicap.

Funcții



Funcția de ridicare a spătarului



Funcția de ridicare a părții picioarelor

Tăblie pentru cap și tăblie pentru picioare

Versiunea standard a patului este echipată cu tăblie pentru cap și tăblie pentru picioare detașabile, pentru a oferi un acces mai bun la pacient. Tăblia pentru cap și tăblia pentru picioare sunt fabricate din folie albastră de polipropilenă folosind metoda injecției.



Laterale

Patul este echipat cu balustrade de siguranță laterale care protejează pacientul împotriva căderii accidentale din pat. Lateralele sunt fabricate din oțel inoxidabil și aliaj de aluminiu.

!! Risc de prindere și strivire!!

✘ **La coborârea balustradelor de siguranță, există riscul prinderii sau strivirii membrelor pacientului**

✘ **Înainte de a coborî balustradele de siguranță, asigurați-vă că membrele pacientului nu se află în calea balustradelor de siguranță.**

Roțile

Patul este echipat cu patru roți blocabile, care pot fi controlate individual. Roțile au o frână separată, cu un diametru de 125 mm și amortizare pe o singură parte.

AVERTISMENT

Folosiți întotdeauna frânele atunci când patul nu este în mișcare sau când pacientul se află în pat fără supraveghere.

Șasiu

Șasiul este format din profile de oțel, tratate cu vopsea electronică pe bază de pulbere. Toate suprafețele sunt sigure pentru contactul cu pielea. Salteaua este împărțită în secțiunea pentru spate, secțiunea pentru șezut și secțiunea pentru picioare. Secțiunile pentru spate și picioare pot fi reglate individual.

Sistem de control

La capătul patului sunt instalate pârgii rotative din oțel, care servesc pentru reglarea înălțării spatelui și îndoirea secțiunii pentru picioare.

Parametri

Lungimea totală a patului	208 cm
Lățimea totală a patului	96 cm
Înălțimea totală a patului	50 cm
Lungimea părții utilizabile a patului	196 cm
Lățimea părții utilizabile a patului	90 cm
Unghiul de înclinare a spatelui	0-70°
Unghiul de înclinare a picioarelor	0-30°
Capacitate maximă	260kg

Avertismente

- Acest pat poate fi operat doar de persoane care au fost instruite de către operator pentru utilizarea sa în condiții de siguranță. Dacă patul își schimbă proprietarul, manualul de utilizare trebuie să fie predat împreună cu patul.
- După ORICE modificări, reparații sau lucrări de întreținere și ÎNAINTE de utilizare, asigurați-vă că toate materialele suplimentare sunt bine strânse - altfel pot apărea accidente sau deteriorări.
- Dacă suspectați orice fel de avarie sau defecțiune, scoateți imediat patul din funcțiune până când piesa deteriorată este reparată sau înlocuită!
- Acest pat nu trebuie modificat fără permisiunea producătorului.
- Funcționarea eficientă și sigură, împreună cu protecția maximă a pacienților, poate fi garantată doar dacă se utilizează accesorii originale proiectate pentru modelul respectiv de pat

Întreținere, curățare și verificare

Procedurile de întreținere și curățare ar trebui efectuate cel puțin o dată pe an sau după necesitate. Recomandăm curățarea unității cu un detergent și apă caldă. Nu folosiți o cantitate excesivă de lichid sau detergenți abrazivi.

- Ștergeți patul cu un dezinfectant.
- Lăsați-l să se usuce complet înainte de utilizare.
- Verificați roțile pentru a vă asigura că sunt blocate atunci când este necesar și că se mișcă corect.
- Verificați toate componentele patului.
- Inspectați vizual toate sudurile și fisurile.
- Verificați platforma patului pentru a vedea dacă există componente îndoite sau deteriorate.
- Verificați capetele de acționare și componentele hardware de montaj pentru a observa dacă sunt îndoite sau excesiv uzate.
- Verificați toate șuruburile și prinderile.