

Tub de oxigen Boos Oxygen

Așezați masca sub nas astfel încât să acopere toată zona gurii. Apăsăți supapa pentru a activa fluxul de oxigen din sticlă timp de 1-2 secunde. Respiră adânc. Repetați după cum este necesar.

Atenționare

Tub sub presiune. Poate exploda când este încălzit. Poate provoca sau intensifica un incendiu.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Țineți departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere.

Nu fumați în proximitatea tubului.

Nu perforați ambalajul chiar și după utilizare. A se păstra departe de lumina soarelui.

Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C /122 °F.

Aruncați conținutul gol/ambalajul conform reglementărilor locale.

Consultați-vă medicul cu privire la indicațiile utilizării produsului.