

Produsul este conceput pentru a ajuta persoanele în vârstă, femeile însărcinate sau persoanele care au dificultăți de mișcare și de ridicare.



Deschide pachetul și selectează produsul.



Introduceți manșonul șurubului și garnitura așa cum se arată.



Introduceți manșonul șurubului și garnitura peste cele două tije, adăugați următoarea garnitură și strângeți piulița.



Introduceți capătul mai scurt al cadrului I în bara de sprijin inferioară.



Aliniați găurile de pe ambele părți și introduceți clema de tip C.



Introduceți cotiera în capătul mai lung al cadrului I.



Aliniați găurile de pe ambele părți și atașați clema de tip C.



Mânerul este gata de utilizare.

Dimensiuni:



Notă:

Înainte de utilizare, verificați dacă produsul este deteriorat sau deformat și dacă șuruburile sunt slăbite. Utilizați pe o suprafață plană.

Capacitatea maximă a produsului este de 100 kg.